

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(70908000)

バル 布バフ

【形状・構造及び原理等】

本材は、補綴物等の研磨に使用する。

【原材料】

- 1) バル布バフ ①ホイール部：綿布製
②ステッチ部：綿布製

【性能、使用目的、効能又は効果】

歯科用電気レーズにより回転を与え、研磨材を塗布して補綴物を研磨する。

【品目仕様等】

1) 寸法

直径 (In) ×枚数	直径 (In) ×枚数	直径 (In) ×枚数	直径 (In) × 枚数
3×30	4×60	5×30	6×60
3×40	5×30	3×30	3×30
4×40	5×40	3×30	3×30
4×50	5×50	3×30	3×30

2) 色：ホワイト、イエロー

- 3) 原理：①偏心：ホイールは歯科用電気レーズのバフ用金具に確実に取り付け、回転中に目視で容易に判別出来る偏心を認めてはならない。
②固定：固定部へのホイールの固定は確実で、回転中に離脱飛散してはならない。

【操作方法又は使用方法等】

- ①ホイールを歯科用電気レーズのバフ用金具に確実に取り付け固定します。
②電気レーズにより回転を与え、研磨材を塗布します。
③補綴物等を研磨します。

【使用上の注意事項】

- ①補綴物等の研磨以外の用途には使用しないこと。
②ホイールをレーズに装着した後、適切に装着されていることを確認すること。
③使用前に予備回転を行い、振れないか確認すること。
④無理な角度、過度の加圧は避けること。

⑤本品を使用する際には、目の損傷を防ぐために、保護メガネを使用する事。

【安全取扱い注意事項（接触防止、接触回避など）】

1) 暴露防止及び保護措置

設備対策；①バフ研磨装置での集じん装置、研磨粉じん発生源の密閉、局所排気などを設ける。

②取扱い場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を明確に表示する。

2) 保護具

呼吸器用の保護具； 防じんマスク
手の保護具； ゴム手袋
目の保護具； 安全ゴーグル等
皮膚及び身体の保護具； 状況に応じ、ゴム長靴、前掛け。

【貯蔵・保管】

【貯蔵・保管方法】

1. 本材は高温多湿の場所を避けて保管すること。
2. 本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

単品ポリ袋包装、10個入りポリ袋包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元：

株式会社ユニバル

東京都練馬区東大泉 3-31-11

製造販売業許可番号 13B2X10059

TEL 03-3923-4186

FAX 03-3867-6612

製造元：上海志衆製刷廠/中国

Shanghai Zhizhong Make Brush Factory/China