

歯科材料 9 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材(70908000)

V-ポリッシャー

【形状・構造等】

本材は、下記成分により構成される固体成型体である。

成分	色
酸化アルミニウム、パラフィンワックス	黄銅色

【性能、使用目的、効能又は効果】

義歯の中仕上げ研磨材である

【操作方法又は使用方法等】

バフ等に適量のV-ポリッシャーを塗布しながら研磨作業を行う。

【使用上の注意事項】

1. 安全取扱い注意事項（混合接触、接触回避など）

- ・点火源から遠ざける。
- ・高温物や強酸化剤との接触を避ける。

2. 暴露防止及び保護措置

(1) 設備対策

- ・バフ研磨装置での集じん装置、研磨粉じん発生源の密閉、局所排気などを設ける
- ・取扱い場所の近くに手洗い、洗顔設備等を設け、その位置を明確に表示する。

(2) 保護具

- 呼吸器用の保護具； 防じんマスク
- 手の保護具； ゴム手袋
- 目の保護具； 安全ゴーグル等
- 皮膚及び身体の保護具； 状況に応じ、ゴム長靴、前掛け

3. 適切な衛生対策

マスク等の交換は定期又は使用の都度行う。

【重要な基本的注意】

- ① 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避ける為マスク及び集塵装置を使用して粉塵を吸い込まないよう注意すること。
- ② 本材は目に入れないように注意すること。万一目に入った場合にはすぐ大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ③ 本材の切削、研磨の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡などを使用すること。
- ④ 本材は、包装に記載の用途以外に使用しないこと。
- ⑤ 本材は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管】

【貯蔵・保管方法】

1. 本材は高温多湿の場所を避けて保管すること。また開封後は密閉して保管すること。
1. 本材はアルカリ性物質との共存を避けること
1. 本材は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

500g 紙箱包装

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所】

製造販売元：

株式会社ユニバル

東京都練馬区東大泉 3-31-11

製造販売業許可番号 13B2X10059

TEL 03-3923-4186

FAX 03-3867-6612

製造元：株式会社ユニバル