

2010年6月15日(初版)
2011年7月21日(第3版)

製造販売届出番号 13B2X10059000002

歯科材料(08) 歯科用石こう及び石膏製品
一般医療機器 : 歯科用硬質石こう (70897020)

販売名 : バルマウント

【形状・構造等及び原理等】

本材は、下記成分より構成される歯科模型用硬質石こうで、水と練和すると一定時間後に硬化する。

該当規格 : JIS T 6605「歯科用硬質石こう」

種類 : タイプ 1

形状	粉末
成分	硫酸カルシウム半水塩、その他
色調	ホワイト

【使用目的・効能又は効果】

歯科技工物・特にマウント用模型製作に使用する。

【品目仕様等】

[物理的性能]

標準混水比	0.26
硬化時間	3.5分
硬化膨張	0.07%
圧縮強さ(1時間後)	27MPa

(試験方法:JIS T 6605:2005による)

【操作方法又は使用方法等】

- 標準混水量は、本品粉末100gに対し、水26mlです。
練和及び流し込みに支障のない限り、混水量は少ない方が強度の高い表面滑沢な模型が得られます。
- 練和は手練りにて、練和時間が10～30秒間で均一になるまで練和してください。
- パイプレーターを使用すると、より気泡の少ない美しい模型が得られます。

【使用上の注意】

- 重要な基本的注意
 - 本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。
- 使用注意
 - 本材を扱う際(硬化体を研削する場合も含む。)には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
 - 本材の硬化体を研削する際には、目の損傷を防ぐため、保護メガネなどの防具を使用すること。
 - 本材は、歯科用硬質石こうの用途以外に使用しないこと。
 - 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- 本材は、高温・多湿の場所を避けて保管すること。
- 開封後は、密封して保管すること。
- 本材は、歯科医療有資格者以外が触れないように適切に保管管理すること。

[有効期間・使用の期限]

本材は、包装に記載の使用期限(※)までに使用してください。

[記載の使用期限は当社データーによる]

(※○○○○-○○は使用期限○○○○年○○月を示す)

【包装】

20kg入り紙袋(ポリ袋内装)

【製造業者又は販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 株式会社ユニバル
東京都練馬区東大泉3-31-11
製造販売業許可番号 13B2X10059
TEL(03)3923 4186
FAX(03)3867 6612