

添付文書

2006年9月 1日(初版)
2011年7月 21日(第5版)

歯科材料 (08) 歯科用石こう及び石こう製品
一般的名称 : 歯科用硬質石こう (70897020)
一般医療機器

製造販売届出番号 13B2X10059000006

販売名 : バルロック

【形状・構造及び原理】

本材は、下記成分より構成される歯科印象模型用硬質石こうで、水と練和すると一定時間後に硬化する。

該当規格 : JIS T 6605「歯科用硬質石こう」

種類 : タイプ 3

形状	粉末
成分	硫酸カルシウム半水塩, 着色材, その他
色調	ブラウン

【使用目的、効能又は効果】

シリコン印象材などの精密印象用模型材として用い、総義歯、局部義歯、クラウン、及びブリッジ用の歯形製作に使用する。

【品目仕様等】

[物理的性質]

混水量[粉末100gに対して]	mℓ	20
硬化時間	分	9~12
硬化膨張	%	0.08
圧縮強さ[1時間後]	MPa	59以上
乾燥圧縮強度	MPa	115以上

試験方法: JIS T 6605 (2005) による。

【操作方法又は使用方法等】

- 1) 混水量は粉末100gに対して20mℓが標準ですが、水の量は操作性に支障の無い限り少量で練和した方が好結果が得られます。
- 2) 練和時間は30~60秒間で、均一に練和して下さい。
 - ①真空練和の場合は、粉末を水に馴染ませた後 30秒間練和して下さい。
 - ②手練和の場合は、均一になるまで練和して下さい。
練和量により差がありますが30~60秒間練和して下さい。

【使用上の注意】

- ① 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため適切な粉塵装置を使用し粉塵を吸い込まないよう注意すること。
- ② 本材は目に入れないように注意すること。万一目に入った場合にはすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ③ 本材の切削、研磨の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡などを使用する。
- ④ 本材は、包装に記載の用途以外に使用しないこと。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び有効期限等】

[貯蔵・保管方法]

- ・ 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・ 開封後は直ちに使用すること。開封したまま放置すると吸湿し、変質する恐れがあります。
- ・ 開封後は十分に密封するか、密封できる容器に移して保管すること。
- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期限、使用の期限]

本材は、包装に記載の使用期限(※)までに使用してください。

[記載の使用期限は当社データーによる]

(※○○○○-○○は使用期限○○○○年○○月を示す)

【包装】

1箱 : 6kg入り : 1.5kg×4袋(アルミラミネート袋)/箱

1袋 : 20kg入り紙袋(ポリ袋内装)

【製造業者又は販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売元 株式会社ユニバル

東京都練馬区東大泉3-31-11

製造販売業許可番号 13B2X10059

TEL(03)3923 4186

FAX(03)3921 4156