

2006年9月 1日(第9版)

許可番号 13BZ200114

2005年7月15日(第2版)

歯科素材8 歯科用石こう及び石こう製品
歯科用硬質石こう バルストーン

【形状・構造等】

本材は、下記成分より構成される。

形状	成分
粉末	石こう、着色剤、その他

【性能、使用目的、効能又は効果】

歯科用硬質石こう

[物理的性質]

混水量[粉末100gに対して](ml)	24
硬化時間(分)	11
硬化膨張(%)	0.2
ぬれ圧縮強さ[1時間後](Mpa)	44

※混水比0.24にて測定。

試験方法:JIS T6005に準ずる

[使用目的]

総義歯、局部義歯、クラウン、ブリッジ及び矯正用の模型製作。

【操作方法又は使用方法等】

- ① 混水量は粉末100gに対して24mlが標準ですが、水の量は操作性に支障の無い限り少量で練和した方が好結果が得られます。
- ② 練和時間は30～60秒間で、均一に練和して下さい。

【使用上の注意】

- ① 本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため適切な粉塵装置を使用して粉塵を吸い込まないよう注意すること。
- ② 本材は目に入れないように注意すること。万一目に入った場合にはすぐに大量の水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。
- ③ 本材の切削、研磨の際には目の損傷を防ぐ為、保護眼鏡などを使用する。
- ④ 本材は、包装に記載の用途以外に使用しないこと。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び有効期限等】

[貯蔵・保管方法]

- ・ 高温多湿の場所を避けて保管すること。
- ・ 開封後は直ちに使用すること。開封したまま放置すると吸湿し、変質する恐れがあります。
- ・ 開封後は十分に密封するか、密封できる容器に移して保管すること。
- ・ 歯科の従業者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期限、使用の期限]

本材は、包装に記載の使用期限(※)までに使用してください。

[記載の使用期限は当社データーによる]

(※○○○○—○○は使用期限○○○○年○○月を示す)

【包装】

1.5kg入りアルミナ袋×4/箱

【製造業者又は販売元の氏名又は名称及び住所】

製造販売業者

有限会社バルプラストジャパン

〒178-0063

東京都練馬区東大泉3-31-11

製造販売元

有限会社バルプラストジャパン

〒178-0063

東京都練馬区東大泉3-31-11

TEL(03)5387 2701

FAX(03)3923 4186